



サラサイド除菌クロス

細菌・ウイルスを強力に除去

タンパク汚れ、油脂汚れにも 効果を発揮

第四級
アンモニウム
塩

3つの成分が
相乗効果を
発揮
します

エタノール

アルカリ剤



80枚入 ピロータイプ
1枚サイズ:175×200mm



80枚入 容器
1枚サイズ:140×210mm



250枚入 容器 大判クロス
1枚サイズ:150×300mm

製品特徴


1. 除菌成分として第四級アンモニウム塩とエタノールを配合しています。
2. 清拭後、すばやく乾きます。
3. 金属やプラスチックに対して低い腐食性です。
4. 二度拭きが要りません。

サラサイド除菌クロスの性能評価

医療現場では血液などのタンパク汚れ、皮脂などの脂質汚れがある可能性があり、環境整備に使用する製品には、これらを適切に除去できることが求められます。サラサイド除菌クロスは、タンパク汚れ、油脂汚れに対して高い洗浄効果を有しています。


① タンパク汚れに対する洗浄力

硬質表面にタンパク汚れを付着させ、乾燥させた後にサラサイド除菌クロスで清拭。(n=3)

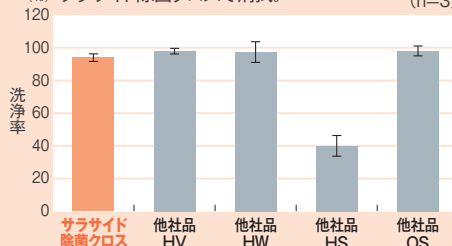

② 油脂汚れに対する洗浄力

硬質表面に油脂汚れを付着させ、乾燥させた後にサラサイド除菌クロスで清拭。(n=3)

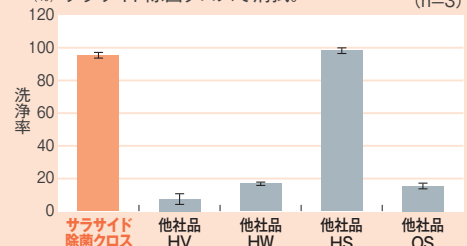

医療施設・介護施設の環境清拭に サラサイド除菌クロス

開封日記録シール付き



250枚入 容器

フタに開封日が書き込める記録シールが付いています。



詰替えるたびに新しい取り出し口に交換できます



250枚入 詰替

詰替1袋にフタが1コと開封日記録シールが付いています。



80枚入 容器

フタに開封日が書き込める記録シールが付いています。



80枚入 詰替

詰替1袋にフタが1コと開封日記録シールが付いています。




80枚入 ピロータイプ

フタに開封日が書き込めます。吊り下げすることもできます。



用途

ドアノブ・ベッド柵・オーバーテーブル・ME機器など、手が頻繁に触れる部位や、便座・トイレまわりの除菌に。

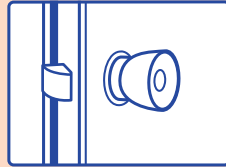

ドアノブに



ベッド柵、オーバーテーブルに



ME機器に



便座、トイレまわりに

※トイレには流さないでください。

使用上の注意

- 乾燥を防ぐために使用後はフタをしっかりと閉めてください。
- 材質・塗装の種類によっては表面が変色・変質することがありますので、目立たない部分で試してから使用してください。
- 機器などにご使用の際は機器付属の「取扱説明書」をご覧ください。
- 目・顔など人体や食品・食器には使用しないでください。
- 使用時には手袋を着用してください。
- 不織布は水に溶けませんので、トイレに流さないでください。
- 用途以外に使用しないでください。
- 使用している不織布の性質上、経時的に不織布が変色することがありますが、使用上問題ありません。

保管上の注意

- 火気に近づけないでください。
- 高温の場所および直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。
- 子どもの手の届かない所に保管してください。

品名	内容量 / 規格	1コ標準価格 (税抜)	1梱入数	JANコード
サラサイド除菌クロス	250枚入 容器	オープン	6	49-87696-51684-7
	250枚入 詰替	オープン	6	49-87696-51685-4
	80枚入 容器	500円	20	49-87696-51681-6
	80枚入 詰替	400円	20	49-87696-51682-3
	80枚入 ピロータイプ	オープン	30	49-87696-51686-1

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2017年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部
TEL.06-4706-3938 (受付時間：平日9:00~18:00)